

# LIMPIEZA y DESINFECCIÓN del MATERIAL UTILIZADO en la ATENCIÓN a los PACIENTES


## CORONAVIRUS



Los Coronavirus son sensibles a desinfectantes de uso habitual en el medio sanitario.

Dilución 1:10 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente

## MATERIAL DESECHABLE

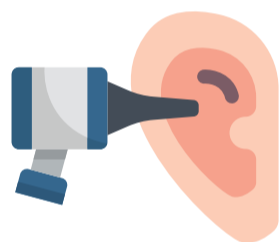


**CONOS DE OTOSCOPIO**  
Son de un solo uso. No se deben reutilizar.

## MATERIAL QUE NECESITA LIMPIEZA



### OTOSCOPIO y OFTALMOSCOPIO

Se deben limpiar con gasas o papel desechable con la dilución de lejía o con desinfectante de uso habitual en el medio sanitario y dejar secar.

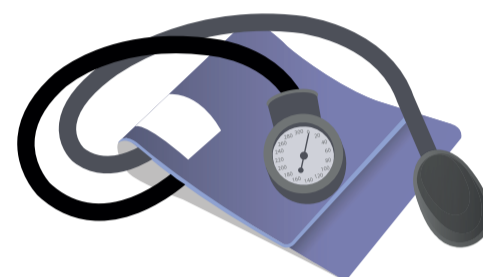

### ESFIGMOMANÓMETRO

**PARTE TEXTIL:** lavar con lejía o desinfectante.

**MANÓMETRO Y GOMAS:** limpiar cuidadosamente con un trapo humedecido con la dilución de lejía o con desinfectante.


## MATERIAL QUE NECESITA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



### FONENDOSCOPIO

Limpiar con una gasa humedecida con lejía o desinfectante y dejar secar.

La membrana de contacto: desinfectar con alcohol 70°

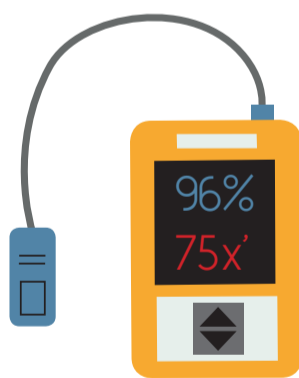

### PULSIOXÍMETRO

**APARATO:** Limpiar con lejía o desinfectante, aclarar con una gasa humedecida en agua y dejar secar.

**TRANSDUCTOR:** Además de la limpieza, desinfectar con alcohol de 70°



### TERMÓMETRO

Limpiar con la dilución de lejía o con el desinfectante.

Desinfectar con alcohol 70° y dejar secar