

LIMPIEZA y DESINFECCIÓN del MATERIAL UTILIZADO en la ATENCIÓN a los PACIENTES COR NAVIRUS



Los Coronavirus son sensibles a desinfectantes de uso habitual en el medio sanitario.

Dilución 1:10 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente

MATERIAL DESECHABLE




CONOS DE OTOSCOPIO
Son de un solo uso. No se deben reutilizar.

MATERIAL QUE NECESITA LIMPIEZA



OTOSCOPIO y OFTALMOSCOPIO

Se deben limpiar con un trapo humedecido con la dilución de lejía o con desinfectante de uso habitual en el medio sanitario y dejar secar.

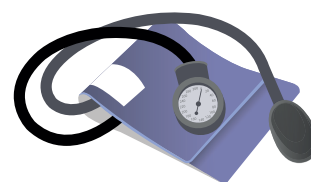

ESFIGMOMANÓMETRO

PARTE TEXTIL: lavar con lejía o desinfectante.

MANÓMETRO Y GOMAS: limpiar cuidadosamente con un trapo humedecido con la dilución de lejía o con desinfectante.


MATERIAL QUE NECESITA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



FONENDOSCOPIO

Limpiar con una gasa humedecida con lejía o desinfectante y dejar secar.

La membrana de contacto:
desinfectar con alcohol 70º

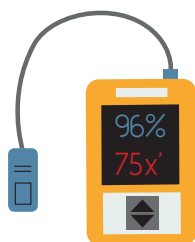

PULSIOXÍMETRO

APARATO: Limpiar con lejía o desinfectante, aclarar con una gasa humedecida en agua y dejar secar.

TRANSDUCTOR: Además de la limpieza, desinfectar con alcohol de 70º



TERMÓMETRO

Limpiar con la dilución de lejía o con el desinfectante.

Desinfectar con alcohol 70º y dejar secar